



umano medical

AIDE-MÉMOIRE



VUE D'ENSEMBLE

A Commandes au pied

- Verrou des commandes
- Mouvements du lit
- Balance et détection de sortie
- Indicateur de la batterie

B Lumières de détection (pare-chocs au pied)

- **Vertes** = Le système est armé
- **Oranges** clignotantes = Système en alarme
- **Éteintes** = Le système n'est pas utilisé

C Extension de lit


- Atteindre et tirer la poignée **verte**
- Tirer pour allonger et pousser pour rétracter
- Placer à la longueur désirée et bloquer
- Installer l'extension de matelas

D Extension électrique* de la largeur Infinite^{MC}

- Déverrouiller en appuyant sur le cadenas
- Appuyer sur les boutons pour élargir/rétracter

Les mouvements seront automatiquement verrouillés après une minute d'inactivité.

*Aussi fonctionnelle sur la batterie

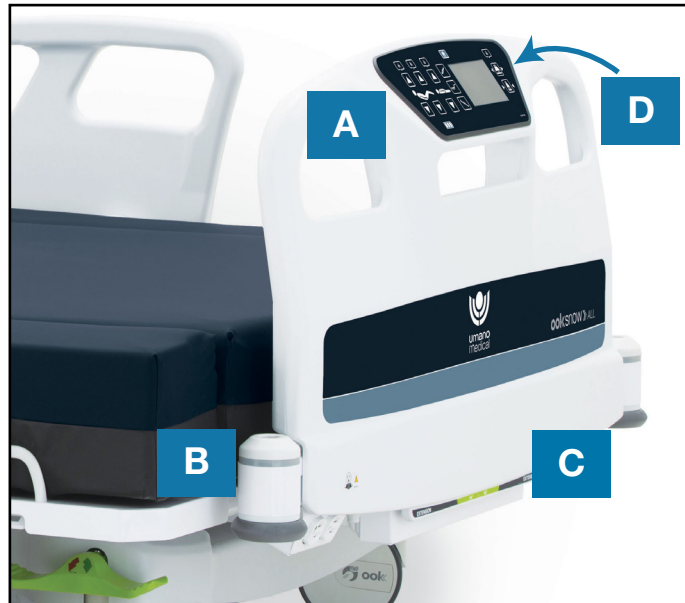


E Système d'appoint manuel de l'extension de la largeur

- Tirer la manivelle et tourner pour élargir ou rétracter la surface patient.


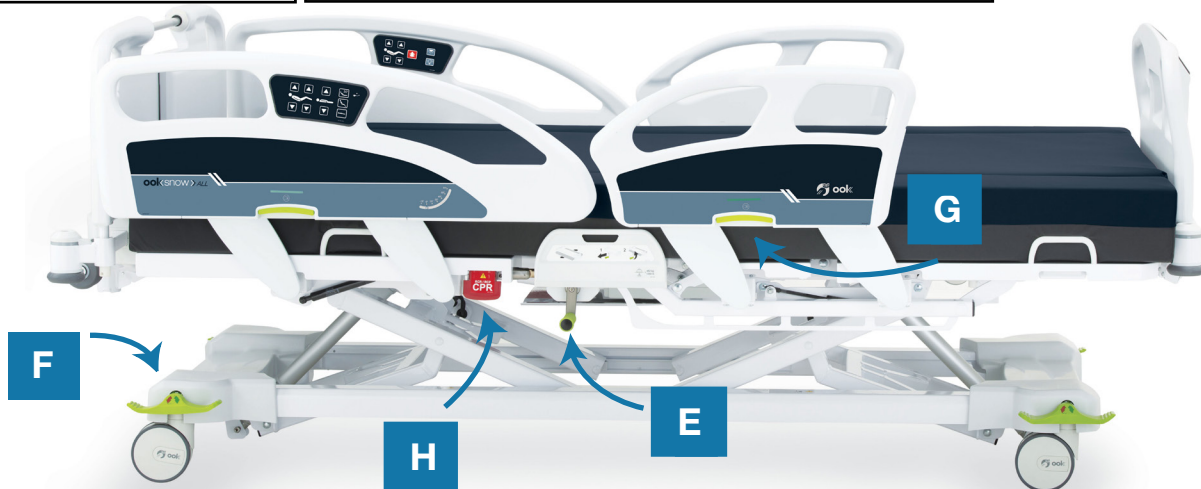
La manivelle se rétractera automatiquement lorsque relâchée.

RAPPELS

Le lit doit être branché afin d'activer l'écran et les options avancées



Actionner les freins

F Pédales de freins

- Côté **rouge** = freins actionnés
- Côté **vert** = position directionnelle
- À plat = position neutre (le lit est complètement mobile)

G Activation des côtés de lit

- Soulever la poignée **verte** pour déverrouiller le côté de lit et l'abaisser
- Le côté de lit affiche une fenêtre **verte** qui devient **rouge** si son état n'est pas sécuritaire

H Poignées de relâche RCR

- Tirer la poignée **rouge**
- Descendre complètement le dossier

La section cuisse se mettra automatiquement à plat. Pour arrêter le mouvement, appuyer sur un bouton.

Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour les instructions plus détaillées, les mesures de sécurité ainsi que les avertissements.

BALANCE ET DÉTECTION DE SORTIE

Bouton d'accueil permettant à l'utilisateur de retourner au menu principal en tout temps



H Pour armer/désarmer LE SYSTÈME DE DÉTECTION (mode régulier/manuel)

Le patient doit être dans le lit pour armer le système

① Pour armer le système de détection:

À partir de l'écran d'accueil:

Appuyer sur 'ARMER DÉTECTION' **H**

Appuyer sur 'OUI' (pour armer)

Si le lit est équipé de pare-chocs avec lumières de détection, elles s'allumeront en **vert** ou clignoteront en **orange**.

② Pour désarmer (si l'alarme est déclenchée):

Appuyer sur 'DÉSARMER' (à partir de l'écran d'accueil)

Le système sera désarmé. En mode manuel, le patient doit être replacé dans le lit. Le système de détection de sortie peut ainsi être armé de nouveau.

H Pour armer/désarmer LE SYSTÈME DE DÉTECTION (mode Auto Détection)

Lorsque le mode Auto Détection est activé et que le patient est dans le lit, le système s'arme automatiquement.

Pour désarmer (si l'alarme est déclenchée):

Appuyer sur 'DÉSARMER' (à partir de l'écran d'accueil). Le système sera désarmé.

Si le patient est hors du lit:

Le système retournera en mode d'attente.

Si le patient est dans le lit:

Une pause de 60 s sera initiée.

Si après 60 s le patient est dans le lit, le système de détection de sortie s'armera automatiquement.




I Pour changer le niveau de DÉTECTION

L'alarme du système de détection doit être désactivée pour effectuer ces changements.

À partir de l'écran d'accueil:

- Appuyer sur
- Sélectionner un des trois niveaux de détection disponibles
- Appuyer sur 'OUI' (pour changer la détection)

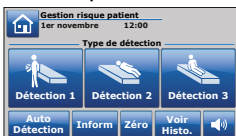

J BALANCE - pour mettre le lit à ZÉRO

À partir de l'écran d'accueil:

- Appuyer sur 'BALANCE'
- Appuyer sur 'ZÉRO'
- Appuyer sur 'OUI' pour procéder

IMPORTANT: Le patient doit être sorti du lit pendant la procédure.



J BALANCE - pour peser le patient

À partir de l'écran d'accueil:

- Appuyer sur 'PESER' pour afficher le poids.
- Appuyer sur 'BALANCE'

Un historique de poids indique les poids enregistrés.



K Menu préférence

Gestion de la largeur, configuration des lumières, verrous, ID, Auto-contour, ajustement de la hauteur minimum, date/heure, langues et maintenance.

I Pour activer/désactiver le mode AUTO DÉTECTION

À partir de l'écran d'accueil:

- Appuyer sur
- Appuyer sur 'AUTO DÉTECTION' pour activer/désactiver



I Pour modifier les réglages de l'ALARME (volume et tonalité)

L'alarme doit être désactivée afin de modifier les réglages.

À partir de l'écran d'accueil:

- Appuyer sur 'GESTION RISQUE PATIENT'
- Appuyer sur et effectuer les changements désirés
- Appuyer sur 'OK' pour confirmer

Pour une assistance immédiate, veuillez contacter votre représentant local.